

Stručný návod k hnacímu násadci PL-40 H

Tento stručný návod NENAHAZUJE návod k použití!



Stav hnacího násadce

LED hnacího násadce



Akumulátor je nabitý na 2–25 %
> Ukončete ošetření
> Nabijte akumulátor



Akumulátor je nabitý na 1 %
> Nabijte akumulátor



Chybové hlášení
> Obráťte se na autorizovaného
servisního partnera společnosti W&H



Probíhá nabíjení akumulátoru
> Není připraven k provozu

Stav nožního ovládání

LED hnacího násadce



Akumulátor nožního
ovládání je vybitý
> Ukončete ošetření
> Nabijte akumulátor
nožního ovládání

LED nožního ovládání



Navázáno spojení
s připojeným zdravotnickým
prostředkem



Akumulátor je vybitý
> Nabijte akumulátor



Probíhá nabíjení akumulátoru

Zapnutí/vypnutí hnacího násadce



Zapnutí
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP.



Akumulátor je nabitý na 25–100 %
Násadec je připraven k použití (nabíjecí kabel nesmí být zapojený)

Vypnutí
Držte tlačítko ZAP/VYP 2 sekundy stisknuté.
Po 4 minutách nečinnosti přejde hnací násadec
do pohotovostního režimu.

Ovládání počtu otáček



Stiskněte nožní ovládání
a libovolně ovládejte počet
otáček.

Stručný návod k hnacímu násadci PL-40 H

Párování (Pairing)



- 1 Stiskněte na 5 sekund tlačítko ZAP/VYP hnacího násadce.



- 1 LED bliká zeleně:
Hnací násadec je na 30 sekund v režimu párování.



- 2 Stiskněte tlačítko nožního ovládání (na spodní straně) jehlou na 3 sekundy.



- 2 Po 3 sekundách se změní stavová LED z mihotání na blikání. Párování (Pairing) aktivní.



- 2 Párování (Pairing) úspěšné.



- 2 LED bliká střídavě. Párování (Pairing) neúspěšné.

Kontrola stavu akumulátoru hnacího násadce



- 1 Stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP, když je hnací násadec zapnutý nebo během nabíjení.



- 3x Akumulátor je nabitý na 75–100 %



- 2x Akumulátor je nabitý na 50–75 %



- 1x Akumulátor je nabitý na 25–50 %



- Akumulátor je nabitý na 2–25 %

Legenda

LED	svítí	blíká	záblesky
ZELENÁ			
ORANŽOVÁ			
ČERVENÁ			

Strana 2 z 2