

#whdentalwerk



wh.com

# Proxeo Aura systém vzduchového pískování

## Jak se vyhnout ucpání

### Tipy a triky



#whdentalwerk



wh.com



# Před ošetření

Kroky, jak začít


#whdentalwerk

# Před ošetřením



## Instalace

1. Vyprázdněte kompresor
2. Zkontrolujte O-kroužky rychlospojky a přední část násadce

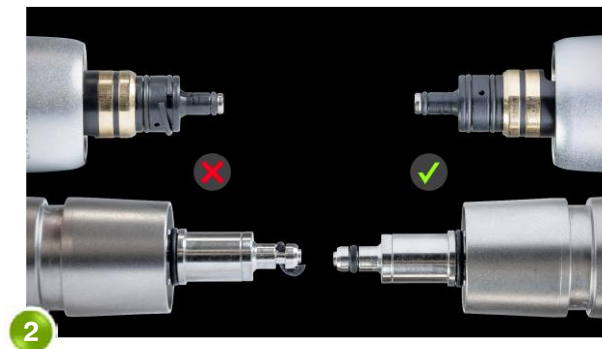

# Před ošetřením



**Ujistěte se, že jsou součásti suché:**


3. Žádné kapky vody na rychlospojce
4. Žádná voda na přední a zadní straně násadce
5. Žádná voda vpředu ani vzadu nebo uvnitř pískovacího násadce
6. V zásobníku na prášek není voda ani vlhkost



3



4

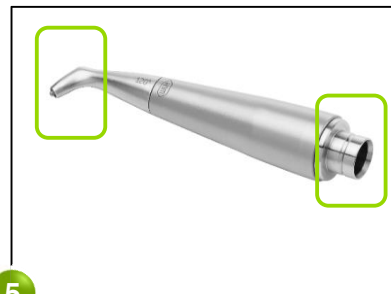

5



6

#whdentalwerk

# Před ošetřením



Ujistěte se, že je rychlospojka správně připojená:

- 7. k hadici
- 8. k násadci



# Před ošetřením

## Výběr a nastavení prášku

9. Před použitím prášek **protřepejte**
10. Pomocí nastavovacího kroužku **zvolte správný pracovní tlak**

**PROPHY NASTAVENÍ** pro  
profylaktický prášek SOFT a  
profylaktický prášek SMOOTH



10



9

**PERIO NASTAVENÍ** pro  
profylaktický prášek  
SENSITIVE – Glycinový  
prášek

# Před ošetřením

11. Maximální množství prášku je uvedené na zásobníku

→ nepřepĺňujte zásobník

ÚROVEŇ PROPHY pro  
profylaktický prášek SOFT a  
profylaktický prášek  
SMOOTH



ÚROVEŇ PERIO pro  
profylaktický prášek  
SENSITIVE – Glycinový  
prášek

#whdentalwerk



wh.com




# Během ošetření

Správná manipulace pro dokonalé výsledky



# Během ošetření


- > Během používání Proxeo Aura příliš nenaklánějte, pokud možno **ne více než 45°** jak podélně, tak příčně.
- > V případě, že potřebujete nasměrovat trysku jinam, můžete otočit pískovací násadec o 360°.
- > Nadměrné nebo nesprávné naklonění zařízení může vést ke **snížení účinnosti**.

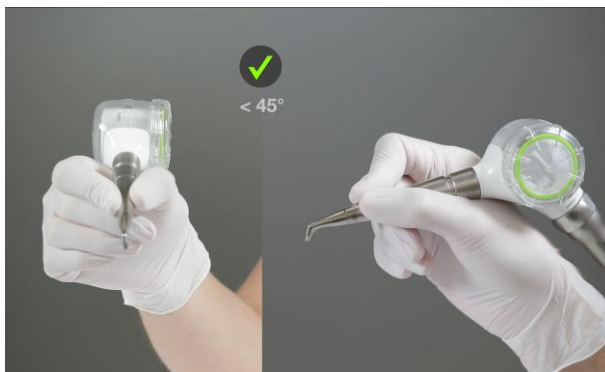

#whdentalwerk

# Během ošetření

- > Vždy se ujistěte, že je pískovací hlava je držena a umístěna **ve svislé poloze**, aby se zajistilo, že se do pískovacích kanálků nedostane žádná kapka vody.

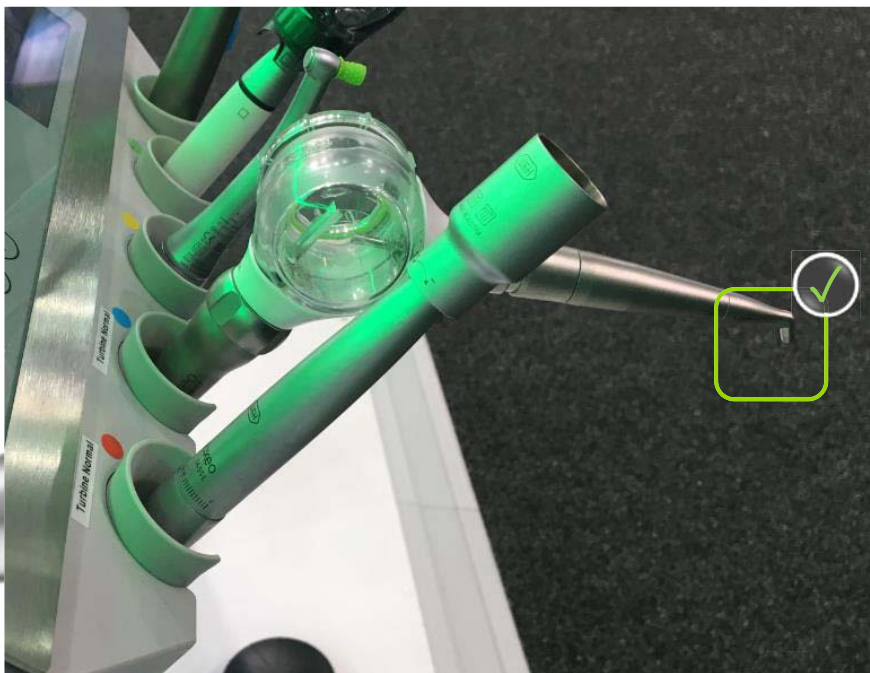

#whdentalwerk



wh.com



# Po ošetření

Jednoduché kroky pro pravidelnou údržbu  
Doporučuje se po každém ošetření, aby nedošlo k  
ucpání

 Trvá to jen **2** minuty!

# Po ošetření

1. Odstraňte perio špičku, pokud je použita
2. Sejměte násadec z rychlospojky
3. Otřete dezinfekcí hlavičku a násadec pískovače




4. Otevřete zásobník prášku
5. Vyprázdněte zásobník prášku



# Po ošetření

6. Pomocí vzduchové pistole stomatologické soupravy vyčistěte zásobník na prášek stlačeným vzduchem
7. Očistěte víčko zásobníku na prášek stlačeným vzduchem
8. Pomocí kartáčku ID vyčistěte vstupy a výstupy v zásobníku

 V zásobníku na prášek a víčku by neměly zůstat žádné zbytky prášku



# Po ošetření



9. Uzavřete nádobu na prášek
10. K vysušení rychlospojky použijte stlačený vzduch → žádná kapka vody na rychlospojce
11. Rychlospojku znovu připojte
12. Stříkejte 8 až 10 sekund bez prášku v systému (proplach pouze vzduchem a vodou)



#whdentalwerk

# Po ošetření

13. Sejměte rychlospojku
14. Sejměte pískovací násadec
15. Nejprve profoukněte vstupy a výstupy na zadní straně pískovacího násadce
16. Profoukněte vstupy a výstupy na přední straně pískovacího násadce
17. Předejte pískovací násadec na ošetření

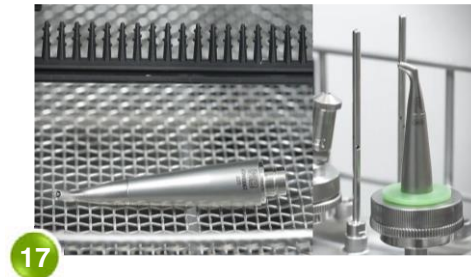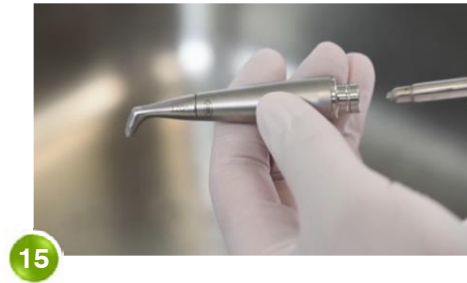

# Po ošetření

18. Vyfoukejte vstupy a výstupy **na zadní straně pískovače**
19. Vyfoukejte vstupy a výstupy **na přední části pískovače**
20. V případě potřeby vyfoukejte znovu **zásobník na prášek** stlačeným vzduchem
21. V případě potřeby vyfoukejte znovu **víčko zásobníku** stlačeným vzduchem
22. V případě potřeby použijte ID kartáček pro opětovné očištění vstupů a výstupů v zásobníku



18




19



20



21

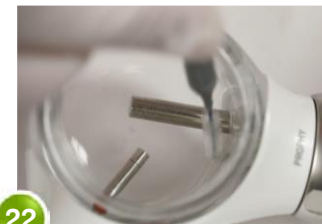

22

 Čištění po ošetření zabere

**2** minuty



# Po ošetření

## Možné metody ošetření

	Dezinfekce otřením	Ultrazvuková lázeň	Termodezinfekce	Sterilizace
Základna pískovače	X			
Pískovací násadec	X	X	X	X
K9 klíček	X	X	X	X
Čistící jehla	X			X

 Subgingivální **perio špičky: pouze na jedno použití!** Dodáváno: jednotlivě balené, sterilní.

Podrobnosti a zpracování najdete v uživatelské příručce v kapitole 06.

#whdentalwerk



wh.com



# V případě ucpání


Tipy pro odstranění ucpaného prášku


#whdentalwerk



# V případě ucpání

Opakujte kroky 1 - 8, jak je popsáno v části „Po ošetření“

 Před zahájením čištění systému od ucpáním vždy očistěte zásobník na prášek a víčko od zbytků prášku

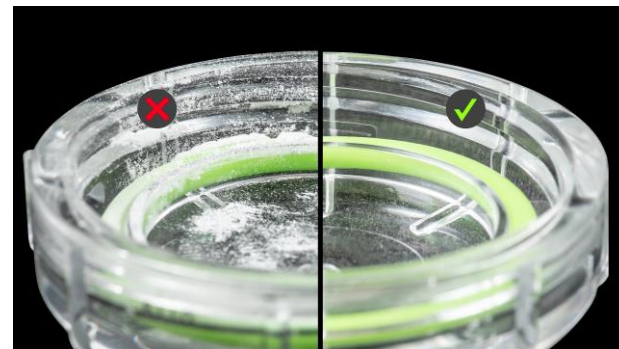


#whdentalwerk

# V případě ucpání


## Čištění násadce

Použijte přiloženou čisticí jehlu  $\varnothing 0,4\text{mm}$ , abyste vyčistili

1. přední vzduchový otvor v násadci od zbytků prášku
2. vystupy a výstupy uvnitř zásobníku na prášek




Jehla  $\varnothing 0,4\text{ mm}$

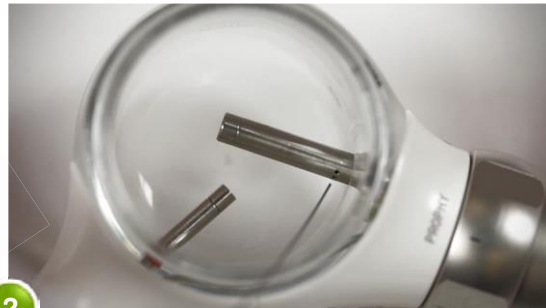

# V případě ucpání

## Čištění pískovače

3. Nechte zásobník na prášek otevřený
4. Připojte pískovač s odšroubovaným víčkem zásobníku na prášek k turbínovému připojení
5. Aktivujte nožní ovládání pro čištění vstupů a výstupů uvnitř zásobníku na prášek (bez přívodu vody, pouze vzduchu)

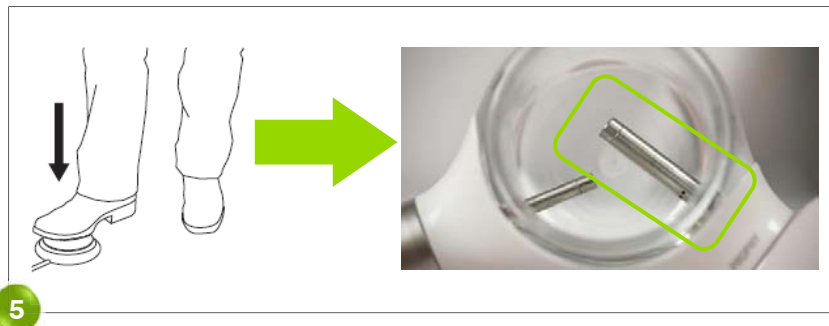

# V případě ucpání


## Čištění násadce pískovače

6. Použijte přiloženou čisticí jehlu  $\varnothing 0,8$  mm k uvolnění centrálního vzduchového otvoru v zadní části pískovacího násadce od zbytků prášku
7. Použijte přiloženou čisticí jehlu  $\varnothing 0,4$  mm, abyste uvolnili centrální vzduchový otvor v přední části pískovacího násadce od zbytků prášku

Jehla  $\varnothing 0,8$  mm




Jehla  $\varnothing 0,4$  mm

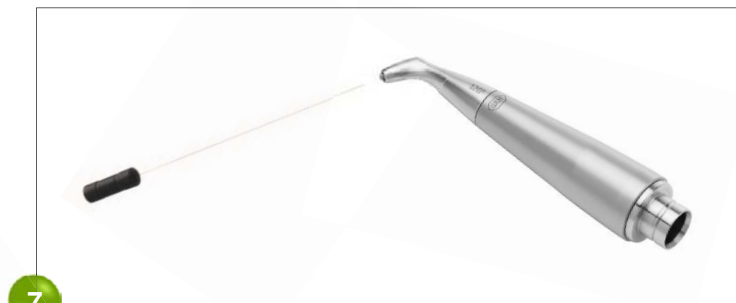

# V případě ucpání


## Čištění pískovacího násadce

8. Foukejte stlačený vzduch z obou stran do středového otvoru pískovacího násadce

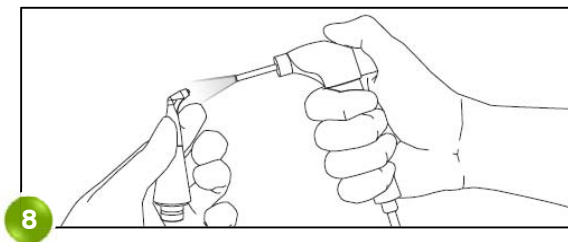

## V případě tvrdé vody

Pokud dojde k ucpání pískovacího násadce v důsledku příliš **tvrdé vody**, doporučujeme ji ponořit na několik minut do **2% roztoku kyseliny octové**.

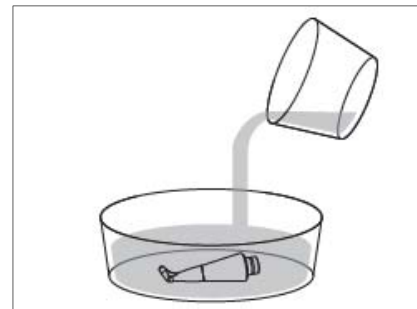

#whdentalwerk



wh.com



**DENTA SERVIS** 